

PULBERE CONCENTRATĂ PENTRU CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE PUTERNICĂ, CHIAR ȘI ÎN ZONELE CU RISC CRESCUT

Incidin™ Active

PULBERE CU SPECTRU LARG PENTRU CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE

Incidin Active este o tehnologie patentată (număr brevet EP 2326704), fiind caracterizat printr-un spectru larg de eficiență (inclusiv virusuri și spori), în combinație cu proprietăți excelente de curățare și compatibilitate demonstrată cu materialele, făcându-l un produs de încredere pentru zonele cu risc crescut.

Cu tehnologia sa PerOxyBalance®, Incidin Active asigură o curățare și dezinfecție puternică într-o singură etapă, de asemenea:

- Compatibilitate excelentă cu materialele
- Poate fi utilizat în zone cu risc ridicat (inclusiv C. difficile)



PerOxyBalance®

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Incidin™ Active

PULBERE CU SPECTRU LARG PENTRU CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE

EFICACITATE EXTINSĂ

Incidin Active este formulat special pentru a combina performanța crescută de dezinfectie împotriva bacteriilor (inclusiv TB), levurilor, fungilor, virusurilor și sporilor cu o curățare excelentă. Eficacitatea virucidă și sporicidă îl face ideal pentru utilizare în situații de focar de norovirus sau C. difficile.

CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE ÎNTR-O SINGURĂ ETAPĂ

Incidin Active combină un spectru larg de eficacitate cu o performanță excelentă de curățare într-o singură etapă simplă, asigurând utilizarea eficientă și fiabilă a produsului.

COMPATIBILITATE EXCELENTĂ A MATERIALELOR

Conceptul activ unic, cu un pH neutru după aplicarea pe suprafețele care trebuie dezinfectate, asigură o compatibilitate excelentă cu materialele.

CARACTERISTICI

- Pulbere care eliberează acid peracetic
- pH produs diluat cu apă curentă (1% - 2%): aprox. 8,5 +/- 0,5
- Pulbere de culoare albă spre gălbui
- Formulare fără perborat
- Pulbere higroscopică

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE

ACTIVITATE BIOCIDĂ / CONDIȚII	CONCENTRAȚIE (%) / CONCENTRAȚIE (G/L)	TIMP DE CONTACT
Bactericid conform EN 13727/EN 16615	1% / 10	5 min*
Levuricid conform EN 13624/EN 16615	1% / 10	5 min*
Fungicid conform EN 13624/EN 16615	2% / 20 2% / 20	15 min** 30 min*
Tuberculocid conform EN 14348/EN 16615	2% / 20	15 min*
Micobactericid conform EN 14348/EN 16615	2% / 20	15 min*
Virucid cu spectru limitat conform EN 14476	1% / 10	10 min*
Virucid conform EN 14476	2% / 20 1% / 10	15 min** 30 min*
Sporicid conform EN 17126	2% / 20 2% / 20	30 min** 60 min*
Sporicid împotriva Clostridium difficile conform EN 17126	1% / 10	15 min*

* condiții de murdărie ** condiții de curățenie 1 lingură de dozare = 30 ml = 20 g

AMBALARE ȘI INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ

PRODUS	UNITATE DE AMBALARE	COD DE COMANDĂ
Incidin™ Active	Găleată de 1,5KG	3051930

Informații locale:

ECOLAB GmbH
Viena sucursala Iași
Centrul de afaceri IDEO
Șos. Păcurari, nr. 138
Iași, 700545
România



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

IGIENA
MEDIULUI



INDICAȚII

Biocid:

Pulbere cu spectru larg pentru curățare și dezinfectie pentru suprafețe generale.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pulbere concentrată. Solubilizați în apă caldă (până la 30°C) la concentrația dorită și amestecați de mai multe ori. După 15 minute, soluția este gata de utilizare.

GĂLEATĂ DE 1,5 KG:

Pentru a dilua, de exemplu, la o concentrație de 1% (10 g/l), adăugați 80 g (4 linguri de 20g/30ml) la 8 litri.

Soluția de lucru trebuie depozitată într-o găleată curată și închisă și poate fi utilizată până la 8 ore. Aplicați în cantitate suficientă (+/- 30 ml/m²). Respectați timpul de contact indicat și condițiile pentru acțiunea antimicrobiană necesară. Dacă se utilizează în condiții de curățenie, curățați mai întâi suprafața (utilizați lavete/mopuri noi, curate pentru fiecare etapă). Nu lăsați laveta în soluție, înmuiați-o imediat înainte de utilizare. Asigurați o ventilație adecvată în timpul utilizării.

COMPOZIȚIE

100g pulbere conțin: 37,9g percarbonat de sodiu, 21,6g tetraacetiletildiamină; producție extemporanee de acid peracetic diluat în apă; 100 g produs soluție de lucru (diluție 2%) conțin: >1000 ppm g acid peracetic (generat in situ) (nr. CAS 79-21-0).

DEPOZITARE

Depozitare: între 0°C și +25°C.

BIOCID - UTILIZAȚI ÎN SIGURANȚĂ PRODUSELE BIOCID

Vă rugăm citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.



PRODUS BIOCID DESTINAT DEZINFECȚIEI SUPRAFEȚELOR
(GRUPA 1 - TP2)

NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™