

Ediție/Revizie:
03/03

Cod document:
FT-01-069

Data ultimei revizii:
18.03.2024

Cod produs:
B069-RO

❖ Avantaje

- ✓ Peste 99% ingrediente biodegradabile
- ✓ Eficiență demonstrată
- ✓ Nu spumează
- ✓ Neutralizează mirosurile neplăcute
- ✓ Nu conține: aldehide, fenoli, clor, conservanți
- ✓ Prezintă capacitate bună de curățare și degresare

❖ Utilizare

Dezinfectarea suprafețelor de diverse tipuri, respectiv pavimentelor sau dezinfectarea instrumentarului medical/ dispozitivelor medicale. Produsul se utilizează pentru dezinfectarea suprafețelor curate / murdare din unități publica, private și medicale.

❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se utilizează ca atare sau se diluează în proporție de 10 ÷ 100% v/v, iar după aplicare nu necesită clătire. Produsul se utilizează pe suprafețe curate/ murdare.

Tehnici de aplicare:

- pulverizator manual,
- ștergere suprafețe cu lavetă curată din microfibră
- imersie în cuvă

În funcție de spectrul de activitate dorit se prepară o soluție gata de lucru cu diluție între 20÷50%, respectiv produs ca atare. De exemplu, pentru prepararea a 1L soluție de concentrație 20% se folosesc 0,2L Peroklin și 0,8L apă potabilă/ demineralizată/ sterilă (în funcție de protocolul intern al unității). Soluția se prepară în recipiente curate, bine închise, utilizând apă potabilă sau demineralizată. Soluție preparată trebuie utilizată în maxim 48 ore și condiționată în recipiente din material plastică/ sticlă, opace/ brune. Se recomandă ca soluția preparată să fie păstrată la temperatura camerei.

Pentru dezinfecția suprafețelor se folosește o cantitate suficientă pentru acoperirea totală a acestora prin tehnicile de aplicare direct pe suprafețe. Consumuri de produs prin: pulverizare manuală 20-50ml/m³, pulverizare electrostatică 4,5-7ml/ m².

Dezinfectarea instrumentarului: instrumentarul curățat și uscat este plasat în cuva cu soluție și acoperit total de lichid. Timp de contact este de maxim 60 minute. După dezinfectare, instrumentarul este clătit cu apă sterilă. Soluția din cuva de dezinfectare poate fi refolosită pentru maxim 5 seturi complete de instrumentar sau în 24 de ore de la umplerea cuvei. Produsul poate fi utilizat și pentru sterilizarea la rece a instrumentarului medical.

Poate fi utilizat în băile cu ultrasunete pentru o dezinfectare ușoară a instrumentarului medical

Efectul de nivel înalt (bactericid, micobactericid, virucid, fungicid și sporicid) este atins după maxim 60 minute de contact direct, după aplicarea produsului.

Produsul este ideal utilizării: în spitale, clinici, laboratoare, policlinici, cabinete medicale, ambulanțe, inclusiv zonele de birou ale acestora sau zonele de cantină, dar nu pe alimente/ contact direct cu acestea. Este ideal pentru utilizarea pe suprafețe intens accesate de oameni cu un risc mare de contaminare (spații de triaj/ așteptare, vestiare, camere pentru consultații, ambulanțe).

Produsul este compatibil cu suprafețe metalice neacoperite (cupru, zinc, bronz, argint, aur, inox medical/ alimentar/ 314L/ 316L), metalice acoperite (vopsea, cromate, galvanizate, email, rășini), plastice de diferite tipuri (PP, PE, HDPE, ș.a.), cauciuc, silicon, teflon, linoleum, lemn, compozite minerale (gresie, faianță, marmură, beton, ș.a.).

A se evita aplicarea produsului direct pe alimente/ produse comestibile.

Tip produs biocid: grupa principală I, PT 2.

❖ Eficacitatea microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
Bactericidă EN 13727 +	≥ 30%	2 minute
Bactericidă EN 13727 (<i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Acinetobacter baumannii</i>)	≥ 30%	3 minute
Bactericidă EN 13697	≥ 50%	3 minute
Fungicidă EN 13697	≥ 50%	3 minute
Fungicidă EN 13624	≥ 80%	3 minute
Sporicidă EN 13704	20%	15 minute
Micobactericidă / Tuberculocidă EN 14348	80%	60 minute
Levuricidă EN 13624 + <i>Candida auris</i>	≥ 20%	5 minute
Levuricidă EN 13624 (<i>Candida auris</i>)	≥ 30%	3 minute
Fungicidă EN 16615	100%	3 minute
Bactericidă/ Levuricidă EN 16615	70 %	3 minute
Bactericidă EN 13697 (MRSA)	80%	5 minute
Levuricidă EN 13697	≥ 20%	5 minute
Virucidă EN 14476	≥ 80%	5 minute
Virucidă EN 14476 (anvelopați)	≥ 30%	1 minute
Fungicidă EN 1650	≥ 20%	5 minute
Levuricidă EN 14562	80%	10 minute
Bactericidă EN 14561	80%	10 minute
Bactericidă EN 1276	≥ 20%	5 minute
Virucidă EN 16777	80%	5 minute
Bactericidă EN 17387	50%	3 minute
Levuricidă/ Fungicidă EN 17387	100%	3 minute
Virucidă EN 17111	100%	8 minute
Micobactericidă / Tuberculocidă EN 14563	100%	40 minute
Sporicidă EN 16615	100%	25 minute
Tuberculocidă EN 16615	100%	60 minute
Sporicidă EN 17126	80%	20 minute



❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 100g produs: 6% Peroxid de hidrogen, nr. CAS: 7722-84-1, CE: 231-765-0 și 0,35% Clorură de didecildimetil amoniu nr. CAS: 7173-51-5, CE: 230-525-2.
- Alte ingrediente: apă, <5% surfactant nonionic, agent pentru corecție pH și stabilizant.
- Descriere: lichid incolor, translucid/ ușor opalescent, cu miros specific
- pH = 2,3 ±0,5
- Solubil în apă

❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: www.klintensiv.com

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 2 ani de la data fabricației, respectiv 6 luni de la deschiderea recipientului. Soluția preparată în diluții conforme cu cerințele din aviz, respectiv nivelul de eficacitate dorit, se utilizează în maxim 48 de ore de la preparare, respectând cerințele de preparare și depozitare.

Produsul este testat și îndeplinește cerințele EN 14885:2022.

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.

❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: www.klintensiv.com

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: office@klintensiv.com, telefon: 021/44.81.498.