

Ediție/Revizie:  
02/04

Cod document:  
FT-01-077

Data ultimei revizii:  
14.05.2024

Cod produs:  
B077-RO

### ❖ Avantaje

- ✓ Dezinfectant de nivel înalt cu acțiune rapidă împotriva microorganismelor
- ✓ Acționează împotriva bacteriilor, fungilor și virusurilor prin mecanism de oxidare, inclusiv la temperaturi scăzute și în condiții de murdărie (resturi organice, de exemplu: sânge, puroi)
- ✓ Stabil din punct de vedere chimic
- ✓ Conține substanțe chimice dezinfectante pentru nivel înalt cu acțiune prin oxidare celulară
- ✓ Este economic și ușor de utilizat
- ✓ Nu necesită clătire după utilizare pe suprafețe dure ce nu sunt în contact direct pacienții
- ✓ Este biodegradabil peste 90% și ecologic, după utilizare se descompune în acid acetic, apă și oxigen

### ❖ Utilizare

Dezinfectarea suprafețelor din unități sanitare, laboratoare medicale, instituții publice (școli, azile de bătrâni, hoteluri, săli de sport, săli de conferință, aeroporturi, gări, hale industriale, etc) precum și cele din domeniul casnic. Suprafețe care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale.

Dezinfectarea instrumentarului medical (seturi pentru intervenții chirurgicale invazive/ minim invazive, intervenții din zona stomatologică) și alte elemente critice ale echipamentelor / dispozitivelor medicale cu indicație de sterilizare chimică (la rece) cu acid peracetic.

### ❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se diluează 3% pentru soluția gata de lucru și poate fi utilizat pe suprafețe curate, iar acesta prezintă acțiune rapidă.

Exemplu mod de preparare: 30ml dezinfectant concentrat + 970ml apă potabilă/ distilată, pentru a obține 1000ml soluție gata de lucru. Soluția preparată este păstrată în recipiente închise, ferită de acțiunea directă a luminii (naturale/ artificiale), la temperatura camerei și utilizată în maxim 24 de ore de la preparare. Verificarea concentrației de acid peracetic în soluția de lucru se poate face cu dispozitivul *Klintensiv Benzi indicatoare de PAA* (pentru maxim 2000ppm).

Tehnici de aplicare:

- se folosește un pulverizator manual
- laveta curată din material sintetic (preferabil poliester/ polietilenă)
- imersie în cuvă/ recipient cu lichid
- nebulizare.

| Metoda de aplicare                                                                                                                                  | Eficacitate microbiologică | Concentrația soluției de lucru | Timp de acțiune |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Se aplică prin ștergere sau pulverizare<br>Cantitatea de soluție dezinfectantă aplicată:<br>4-10ml/m <sup>2</sup><br>Nebulizare: 1ml/m <sup>3</sup> | bactericidă, levuricidă    | 1%                             | 5 minute        |
|                                                                                                                                                     | virucidă                   | 3%                             | 5 minute        |
|                                                                                                                                                     | micobactericidă            | 3%                             | 15 minute       |
|                                                                                                                                                     | sporicidă                  | 5%                             | 5 minute        |
|                                                                                                                                                     | fungicidă                  | 3%                             | 5 minute        |

| Metoda de aplicare                                              | Eficacitate microbiologică                                             | Concentrația soluției de lucru | Timp de acțiune |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Dezinfectarea instrumentarului medical prin imersie sau umplere | bactericidă, levuricidă, fungicidă, tuberculocidă, virucidă, sporicidă | 5%                             | 15 minute       |

Se aplică pe toate suprafețele dezinfectantul OXOKLIN sub formă de soluție gata de lucru 3%-5% cu acțiune bactericidă, levuricidă, fungicidă, micobactericidă și virucidă, respectând timpii de contact specificați.

Se aplică direct pe suprafața ce trebuie tratată sau pe o lavetă curată. Ștergeți bine suprafața ce se dorește a fi tratată. Nu necesită clătire.

Dezinfectarea prin imersie sau umplere totală a instrumentarului medical curat se face prin plasarea acestui într-o soluție de concentrație 5%, în cuva specială prevăzută cu capac, timp de 15 minute. După dezinfectarea instrumentarului/dispozitivelor medicale, acesta se clătesc cu apă sterilă.

Pentru dezinfectarea instrumentarului medical se utilizează o soluție de concentrație minim 3%. Se recomandă îndepărtarea resturilor organice (sânge, puroi, țesut, ș.a.), cu un agent de curățare tip detergent non-enzimatic/ enzimatic. Produsul poate fi utilizat inclusiv în cuvele de dezinfectare a instrumentarului cu / fără ultrasunete

Pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale ce nu permit aplicarea prin imersie se recomandă

Recomandări de utilizare:  
În timpul utilizării, trebuie să vă echipați corespunzător. Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecție a ochilor și a feței, iar pentru nebulizare echipament de protecție a feței și căilor respiratorii, vezi fișa cu date de securitate a produsului. După utilizarea pe suprafețe mari extinse (pereți, pardoseli) se recomandă ventilarea sau aerisirea încăperii cu scopul înlăturării mirosului de oțet.

În condiții normale de utilizare, produsul preparat sub formă de soluții gata de lucru nu este coroziv, nu este iritant pentru căile respiratorii sau mucoase, nu provoacă somnolență, nu este inflamabil în soluția gata de lucru.

Compatibilitate cu materiale: oțel inoxidabil, PVC, polipropilenă, polietilenă, silicon, sticlă, cauciuc.

Nu corodează aluminiul, oțelul inoxul, oțelul cositorit, materialele plastice precum teflonul, PE, PP și PS. Corodează fierul. Nu este recomandat pentru utilizarea pe materiale din cupru.

Nu se recomandă utilizarea pentru pre-dezinfectarea instrumentarului din crom și nichel cu urme vizibile de deteriorare/ uzură.

Tip produs biocid: grupa principală 1, PT 2

Categorie de utilizare: industriali, profesionali.

## ❖ Eficacitatea microbiologică

| Eficacitate          | Concentrație | Timp de contact |
|----------------------|--------------|-----------------|
| Bactericidă EN 13727 | 1%           | 5 minute        |
| Bactericidă EN 13697 | 1%           | 5 minute        |
| Levuricidă EN 13697  | 1%           | 5 minute        |
| Fungicidă EN 13697   | 3%           | 5 minute        |
| Levuricidă EN 13624  | 1%           | 5 minute        |

| Eficacitate                                | Concentrație | Timp de contact |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Fungicidă EN 13624                         | 3%           | 5 minute        |
|                                            | 1,5%         | 40 minute       |
| Virucidă EN 14476                          | 3%           | 5 minute        |
| Micobactericid / Tuberculocid EN 14348     | 1,5%         | 40 minute       |
|                                            | 3%           | 15 minute       |
|                                            | 8%           | 5 minute        |
| Bactericid EN 14561                        | 5%           | 15 minute       |
| Fungicid EN 14562                          | 5%           | 15 minute       |
| Tuberculocid/ Micobactericid EN 14563      | 5%           | 15 minute       |
| Bactericid EN 13727 MRSA                   | 0,5%         | 5 minute        |
| Sporicid EN 13704                          | 3%           | 15 minute       |
|                                            | 5%           | 5 minute        |
| Sporicid EN 13704 (C. difficile, EN 17126) | 5%           | 5 minute        |
| Bactericidă/ Levuricidă EN 16615           | 3%           | 5 minute        |
| Bactericidă EN 1276                        | 1%           | 5 minute        |
| Levuricidă EN 1650                         | 3%           | 5 minute        |
| Fungicidă EN 1650                          | 4%           | 5 minute        |
| Virucidă EN 16777                          | 3%           | 5 minute        |
| Bactericidă EN 17387                       | 2%           | 5 minute        |
| Levuricidă/ Fungicidă EN 17387             | 4%           | 5 minute        |
| Sporicidă EN 17126                         | 5%           | 15 minute       |
|                                            | 2%           | 40 minute       |
| Sporicidă EN 17126 (C. difficile)          | 2%           | 40 minute       |
| Virucidă EN 17111                          | 3%           | 5 minute        |
| Tuberculocidă EN 16615                     | 4%           | 15 minute       |

## ❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 100g produs:  
5% Acid peracetic, CAS: 79-21-0, EC: 201-186-8; 11% Peroxid de hidrogen CAS: 7722-84-1, EC: 231-765-0; 1,5% Etanol CAS: 64-17-5, EC: 200-578-6.
- Alte ingrediente: acid acetic și agenți stabilizanți
- Descriere: Lichid incolor, translucid cu miros de oțet.
- pH soluție 5%v/v: 2 – 3
- Solubilitate: solubil în apă

## ❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ SDS). Pentru a accesa FDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: [www.klintensiv.com](http://www.klintensiv.com)

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

## ❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 2 ani de la data fabricației. Produsul nu se contaminează timp de 6 luni de zile de la deschiderea recipientului După fiecare utilizare se închide). Produsul va



fi păstrat bine închis, în ambalajul original, loc uscat și temperaturi între 5 și 30°C. După deschiderea recipientului se recomandă închiderea atentă. În vederea dozării produsului pentru soluțiile de lucru se oferă pahar dozator gradat în unități de ml. Recipientul gol nu se va reutiliza!

Produsul este testat în acord cu cerințele ISO 14885:2022.

Mențiune privind inflamabilitatea: pictograma GHS03 este specifică conținutului ridicat în peroxid de hidrogen al produsului concentrat Oxoklin și nu concentrației în etanol din produs.

## ❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: [www.klintensiv.com](http://www.klintensiv.com)

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: [office@klintensiv.com](mailto:office@klintensiv.com), telefon: 021/44.81.498.