

Ediție/Revizie:
01/05

Cod document:
FT-01-144

Data ultimei revizii:
31.05.2024

Cod produs:
B144-RO

❖ Avantaje

- ✓ Peste 90% biodegradabil
- ✓ Nu decolorează / pătează după aplicare pe suprafețe netede și solide
- ✓ Eficiență demonstrată în condiții de murdărie
- ✓ Produsul preparat în soluție gata de lucru nu este coroziv, nu oxidează și nu prezintă acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, nu provoacă somnolență sau reacții alergice
- ✓ Conține agenți tensioactivi cu capacitate bună de curățare și spumare redusă
- ✓ Nu conține: clor, aldehide, fenoli, peroxizi

❖ Utilizare

Dezinfectarea și curățarea suprafețelor dure neporoase de diverse tipuri. Curățarea și dezinfectarea de nivel mediu a instrumentarului medical.

❖ Instrucțiuni de utilizare

Recipientul cu produs detergent dezinfectant concentrat este agitat energic înaintea dozării cantității necesare de produs pentru a prepara soluția gata de lucru.

Exemplu mod de preparare: 100ml detergent dezinfectant concentrat + 9,9L apă potabilă, pentru a obține 10L soluție gata de lucru 1%v/v.

Produsul se diluează în funcție de spectrul de activitate dorit și în conformitate cu datele din tabelul următor. Produsul se poate utiliza pe suprafețe curate / murdare. Nu necesită clătire.

Tehnici de aplicare:

- se folosește un pulverizator manual,
- laveta curată din material sintetic (preferabil poliester/ polietilenă), manual sau mașini automate pentru pardoseli,
- imersie în cuvă/ recipient cu lichid.

Pentru dezinfecția suprafețelor se folosește o cantitate suficientă de soluție 0,5-1%v/v gata de lucru, pentru acoperirea totală a acestora (4-10ml acoperă 1m²), prin tehnicile de aplicare direct pe suprafețe. Pentru efectul virucid în condiții de murdărie se prepară o soluție gata de lucru 0,5%. După preparare soluția gata de lucru poate fi folosită în maxim 30 zile calendaristice, dar fără a fi utilizată.

Instrumentarul pre-curățat cu detergent și scurs de surplusul de lichid, este plasat în cuva cu soluție gata de lucru și acoperit total de lichid. Timp de contact minim 60 minute. După dezinfectare, instrumentarul este clătit cu apă (în funcție de tipul de dezinfectare și protocoalele interne ale unității). Soluția din cuva de dezinfectare poate fi refolosită pentru maxim 5 seturi complete de instrumentar sau în 48 de ore de la umplerea cuvei. Se recomandă utilizarea unei cuve opace din material plastic. Lavetele imersate în lichid se vor utiliza într-un interval de maxim 24 de ore de la pregătire.

Se utilizează pentru dezinfectarea diferitelor suprafețe din unități medicale precum: spitale, clinici, cabinete medicale, ambulanțe, unități primiri urgențe, unități medicale mobile, ș.a. Produsul poate fi utilizat și în unități publice și private (instituții publice, unități de cazare, saloane de coafură/ cosmetică, spații pentru activități sportive/ creative, ș.a.), spații casnice/ locative.

Poate fi aplicat direct pe suprafețe din: plastic, metale(acoperit prin cromare, vopsire/ galvanizare), zinc, crom, cupru, aluminiu, 314L, 316L, inox alimentar/ industrial, cauciuc, teflon, silicon, lemn, ceramică, sticlă, pavimente (beton, gresie, lemn, marmură, rășină, linoleum/ tarkett, covoare/ mochete). Produsul poate fi aplicat și pe suprafețe din zona de pregătire și servire a alimentelor (cantină, bucătărie), dar nu în contact cu acestea/ pe alimente.

Tip produs biocid: grupa principală I, PT 2.

Categoria de utilizatori: industriali, profesionali (medical), populație

❖ Eficacitatea microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
Bactericidă EN 13727	0,7%	5 minute
Bactericidă EN 13727 (MRSA)	0,2%	5 minute
Levuricidă EN 13624	0,2%	15 minute
Fungicidă EN 13624	0,75%	15 minute
Fungicidă EN 13697	0,75%	15 minute
Levuricidă EN 13697	0,3%	15 minute
Levuricidă EN 1650	0,2%	15 minute
Fungicidă EN 1650	0,5%	15 minute
Tuberculocidă/ Micobactericidă EN 14348	5%	30 minute
	1%	60 minute
Virucidă EN 14476 (MAV)	0,5%	5 minute
Bactericidă EN 13697	0,5%	30 minute
Bactericidă EN 14561	0,5%	60 minute
Fungicidă EN 14562	0,5%	60 minute
Micobactericidă EN 14563	1%	60 minute

❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 100g produs: 5,1% N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină, nr. CAS: 2372-82-9, CE: 219-145-8; 2,5% Clorură de didecildimetilamoniu, nr CAS: 7173-51-5, CE: 230-525-2.
- Alte ingrediente: ≥5-<15% surfactanți nonionici, solubilizanți, inhibitori de coroziune, agent de chelatizare, apă.
- Descriere produs concentrat: lichid ușor vâscos, translucid, verde deschis cu miros specific.
- pH produs conc. = 10,7 -11,1
- Solubil în apă.

❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: www.klintensiv.com



Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 3 ani de la data fabricației, respectiv 6 luni de la deschidere.

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.

Produsul este însoțit de recipient dozator necesar pregătirii soluției de lucru, conform protocolul stabilit de unitatea medicală, în acord cu documentația tehnică. Recipientul gol nu se va reutiliza!

❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: www.klintensiv.com

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: office@klintensiv.com, telefon: 021/44.81.498.

Informațiile referitoare la acest produs sunt actualizate în mod controlat, atunci când este cazul, de aceea trebuie să vă asigurați că utilizați o variantă actualizată.