

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
CĂRUCIOR TRANSPORT PACIENȚI
MODEL: CML-208GC-46



CARUCIOR TRANSPORT PACIENTI

Model: CML-208GC-46

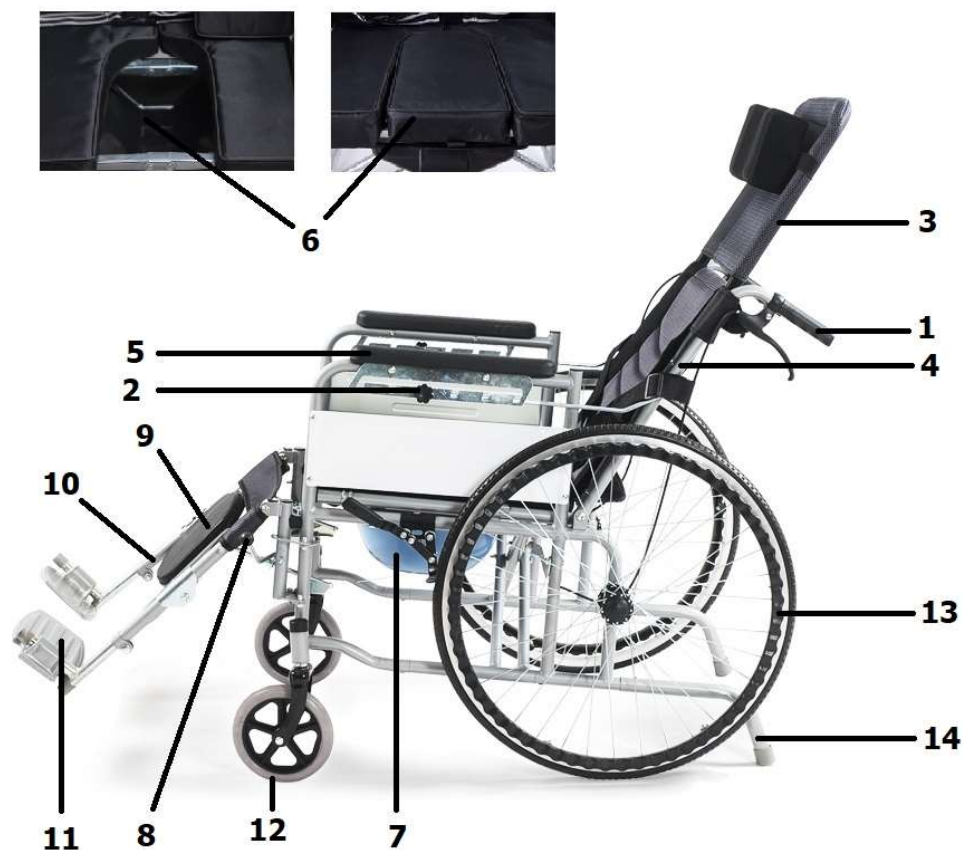


Fig.1

1. mânere pentru deplasarea scaunului cu roțile de către însoțitor
2. surub tip fluture pentru reglajul poziției spătarului de la poziția verticală până la cea orizontală
3. înălțător spătar cu tetiera
4. spătar
5. suport sprijin pentru brațe
6. șezut cu parte centrală detașabilă pentru a avea acces la vasul colector "7"
7. vas colector, realizat din PVC, culisează pe glisieră pentru a fi scos / introdus sub șezut
8. manetă pentru reglajul pe verticală a suportului de sprijin picioare
9. suport pentru sprijinul gambelor, placat cu burete și piele sintetică
10. ansamblu suport sprijin picioare
11. suport de sprijin al tălpilor, înainte de așezarea utilizatorului sau de ridicarea acestuia de pe fotoliu, suportii de sprijin al tălpilor se ridică la verticală, dacă utilizatorul calcă direct cu toată greutatea pe acești suportii, fie fotoliul se răstoarnă peste el sau suportii se rup.
12. roata față
13. roțile spate
14. bară pentru obstacole cu funcție de antirasturnare



Fig.2



Fig.3



Fig.4

Pregătirea scaunului cu roțile pentru utilizare

Extrageți scaunul din ambalaj și așezați-l cu roțile pe pardoseala. Scaunul este pliat (strâns) pentru a ocupa un spațiu mai mic. Pentru a deplia scaunul se procedează ca în figura 2.

Apăsați cu ambele palme pe directă "a" indicată în figura 2 până când șezutul și spatarul fotoliului rulant se vor întinde.

Suportii de sprijin al picioarelor, este câte unul pentru fiecare parte stanga-dreapta a a scaunului. Fiecare suport are 2 orificii de ghidare și corespondent acestora exista 2 axe pe fiecare parte a scaunului, vezi fig.3.

Suportii de sprijin al picioarelor se poziționează din lateral pe axele de ghidare iar apoi se rotesc către partea din fata a fotoliului rulant până când se blochează. Ridicați la verticala stuporii de sprijin al tălpilor, fig.1. Acesta este un aspect important, utilizatorul nu trebuie să se ridice cu toată greutatea corpului pe suport deoarece este posibil ca scaunul cu roțile să se răstoarne peste el. **Urcarea și coborârea de pe scaunul cu roțile se va face cu suportii ridicați la verticala.**

Puneți frânele pe roțile din spate. **Urcarea și coborârea din scaunul cu roțile se face cu roțile spate blocate prin sistemul de frânare de pe fiecare roata.** Vasul colector se montează pe două glisiere aflate sub șezut.

Scaunul cu roțile este gata de utilizare. Suportii de picioare se pot ridica în trepte până la orizontală sau într-o poziție intermediară. Ca să coborâți suportul de sprijin al piciorului, trebuie împinsă maneta de blocare către exterior, se deblochează suportul și poate fi coborât.

Plierea fotoliului rulant

Pentru depozitare, pentru transport, scaunul cu roțile se poate plia pentru a reduce volumul ocupat. Scoateți înălțătorul de spătar fig. 1. Scoateți partea detasabilă de la șezut. Suportii de sprijin al picioarelor se pot demonta prin operația derulată invers indicată în fig.3. Dacă doriți să păstrați suportii de sprijin al picioarelor montați pe fotoliu rulant, ridicați sprijinul pentru talpă, reperul, rotiți către exterior suportii de sprijin al gambelor. Prindeți șezutul din partea din față și cea din spate și ridicați în sus, scaunul va începe să se plieze, continuați apropiind spre interior, lateralele scaunului.

Atenție! Nu încercați să depășiți obstacolele, praguri, borduri, etc trecând în viteză peste ele, roțile fotoliului se vor deforma sau se rup. Obstacolele se depășesc prin ridicarea roților față și trecere lor peste obstacole.

Modificarea poziției spătarului:

Înainte de a modifica poziția spătarului (fig.4), modificați poziția barei pentru obstacole, astfel încât bara devine bară antirăsturnare. În fig.5 puteți observa poziția corectă a barei astfel încât scaunul să nu se răstoarne în cazul în care spătarul este reglat la un unghi prea mare.

Verificați poziția barei de fiecare dată când modificați unghiul de înclinare a spătarului, nu înclinați spătarul dacă bara din spate este poziționată ca în fig. 6, pacientul se va rasturna și poate suferi leziuni.



Fig. 5



Fig.6

SPECIFICATII TEHNICE

Model: CML-208GC

- inaltator de spatar cu tetiera
- spatar reglabil ca pozitie,
- suporti sprijin picioare, pozitie reglabila pana la orizontala, detasabili
- roti fata cu diametrul de 16 cm
- roti spate cu diametrul de 58 cm
- adancime sezut: 41 cm
- latime sezut: 41 cm
- latime intre panurile laterale: 47 cm
- latimea intre manere: 45 cm
- latime totala: 66 cm
- lungime totala: 108 cm
- inaltime sezut fata de sol: 53 cm
- inaltime totala : 119 cm
- greutate scaun rulant: 20.5 kg
- greutate maxima utilizator: 100 kg

Produs in PRC pentru: Medico Farmaceutic Denyro S.R.L
Str. Istriei nr.32, bl. 10B, sector 3, Bucuresti
Tel: 031.409.53.58
Email: office@denyro.ro