



CURATARE ACTIVA DEZINFECTIE EFICIENTA

Sekusept™ aktiv

DEZINFECTANT PE BAZA DE ACID PERACETIC CU PROPRIETATI EXCELENTE DE CURATARE

Sekusept aktiv imbină curățarea activă cu dezinfectarea eficientă și compatibilitatea excelentă cu materialele, toate într-un singur produs care oferă cele mai bune avantaje pentru utilizator, pacient și instrumentar. Sekusept Aktiv:

- Are eficacitate virucidă rapidă pentru dezinfecția terminală
- Indepărtează activ petele de proteine
- Fără efect de fixare



Sekusept™ aktiv

Dezinfectant pe baza de acid peracetic cu proprietăți excelente de curățare

CURĂȚARE

Sekusept aktiv a fost conceput cu scopul de a obține cele mai bune rezultate de curățare. Performanțele sale excelente de curățare sunt dovedite prin testări la institute de igienă externe, independente.

DEZINFECȚIE

Formula inovatoare asigură un sistem complex bazat pe oxigen activ și acid peracetic, cu eficacitate dovedită împotriva bacteriilor, micobacteriilor, fungilor, virusurilor și sporilor bacterieni. Rezultatul este o eficacitate ridicată la timp de contact foarte reduși.

CONVENABIL

Datorită performanțelor sale de curățare și spectrului larg de eficacitate, Sekusept aktiv poate fi utilizat pentru toate etapele de reprocesare manuală a instrumentarului, oferind compatibilitate dovedită cu materialele și o prelungire a duratei de viață a instrumentarului Dvs.

CONCEPTUL PEROXYBALANCE®

Anii de cercetare și dezvoltare au determinat o optimizare a valorii pH-ului în intervalul neutru, demonstrând siguranța utilizării dezinfectanților PerOxyBalance® pentru pacient, personal și a endoscoapelor în sine. Nu este recomandat pentru instrumentarul din alamă și cupru, precum și pentru cel placat cu nichel sau crom, deteriorat.

INSTRUCȚIUNI DE DOZARE

LITRI SOLUȚIE	CONCENTRAȚIA SOLUȚIEI DE LUCRU	
	1% ml	2% ml
2 Litri	30ml = 1 x 	60ml = 2 x 
4 Litri	60ml = 2 x 	120ml = 4 x 
8 Litri	120ml = 4 x 	240ml = 8 x 
10 Litri	150ml = 1 x 	300ml = 2 x 
20 Litri	300ml = 2 x 	600ml = 4 x 
20 Litri	450ml = 3 x 	900ml = 6 x 

100g pulbere = 150ml  1 măsură de dozare = 20g pulbere = 30ml

 1 cană de dozare = 100g pulbere = 150ml

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE

EFICACITATE/CONDITII	CONCENTRAȚIE	TIMP DE CONTACT MIN.
Dezinfectia instrumentarului In conf. cu VAH (bactericid și levuricid) Conditii de curatenie și murdarie	2,0% 1,0%	5 min 60 min
Bactericid In conf. cu EN13727 și EN 14561, conditii de murdarie	2,0% 1,0%	5 min 60 min
Levuricid In conf. cu EN 13624 și EN 14562, conditii de murdarie	2,0% 1,0%	5 min 60 min
Micobactericid In conf. cu EN14348 și EN14563, conditii de murdarie	2,0% 1,0%	15 min 60 min
Tuberculocid In conf. cu EN 14348 și EN 14563, conditii de murdarie	2,0% 1,0%	15 min 60 min
Virucid In conf. cu EN 14476 și EN17111, conditii de murdarie	2,0% 1,0%	15 min 30 min
Sporicid. In conf. cu EN 17126, conditii de murdarie	2,0%	15 min
Sporicid. In conf. cu EN 13704, conditii de murdarie	2,0%	15 min
Clostridium difficile. In conf. cu EN 17126, conditii de murdarie	1,0%	15 min

INFORMATII AMBALARE ȘI COMANDĂ

PRODUS	UNITATE DE AMBALARE	COD COMANDĂ
Cutie Sekusept Aktiv cu măsură de dozare	4 x 1.5kg	3050530
Cutie Sekusept Aktiv cu cană de dozare	6 kg	XXXXXX
Benzi de testare Sekusept Aktiv	4 recipiente cu 50 benzi	3007370

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru curățarea și dezinfectia manuală, precum și, dezinfectia terminală a dispozitivelor medicale. Special conceput pentru dispozitivele termolabile, care nu pot fi autoclavate, de ex. endoscoape flexibile și echipamente anestezie.

PREPARAREA SOLUȚIEI DE LUCRU

Pentru prepararea soluției de lucru folosiți cupa de dozare. Adăugați în apă cantitatea de pulbere necesară, amestecați și repetați de mai multe ori.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru prepararea soluției de lucru folosiți cupa de dozare. Adăugați în apă cantitatea de pulbere necesară, amestecați și repetați de mai multe ori în primele 15 minute. Imersați instrumentarul asigurându-vă că toate suprafețele sunt complet umectate.

Reprocesarea reperelor curate: în conformitate cu instrucțiunile producătorului de instrumentar, inclusiv acțiune mecanică (de exemplu, periaj, ștergere) până ce acestea sunt vizibil curate. Îndepărtați instrumentarul după timpul de contact recomandat și clătiți cu apă de cel puțin calitate a celei potabile. Uscați suprafețele externe și canale interne (de exemplu, endoscoape). Pentru dezinfectia terminală este necesară o soluție de lucru pentru curățare și o alta pentru dezinfecție.

Soluția de lucru trebuie preparată zilnic. În cazul unei contaminări vizibile, preparați imediat o nouă soluție de lucru.

O UȘOARĂ DECOLORARE A PULBERII ESTE POSIBILĂ, ACEST LUCRU NU INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE PRODUSULUI.

INGREDIENTE

Percarbonat de sodiu, tenside neionice, fosfonați. Conținut substanță activă pentru o soluție de 2% pentru utilizare efectivă: > 1.000 ppm acid peracetic.

DEPOZITARE

Periculos. Respectați instrucțiunile de utilizare (în conformitate cu normele europene în vigoare privind clasificarea și etichetarea produselor chimice). Depozitare: între + 5°C și + 25°C.

CERTIFICATE

Dispozitiv medical. Eficacitatea antimicrobiană completă pentru Sekusept aktiv este inclusă în dosarul științific, disponibil la cerere.

DISPOZITIV MEDICAL - UTILIZAȚI ÎN SIGURANȚĂ

Va rugăm să citiți informațiile de pe eticheta și Fișa Tehnică a produsului.



DOAR PENTRU UTILIZATORII PROFESIONALI.

SC ECOLAB SRL

Centrul de afaceri IDEO
Sos Pacurari, nr 138,
Iasi, 700545
Romania



CE
0297

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



www.ecolab.ro