



CURATARE PERFORMANTA DEZINFECTIE EFICIENTA

Sekusept™ Pulver CLASSIC

DETERGENT SI DEZINFECTANT PENTRU REPROCESAREA MANUALA A INSTRUMENTARULUI MEDICAL

Sekusept Pulver Classic este un produs pulbere pentru curatarea si dezinfectia rapida a instrumentarului.

Sekusept Pulver Classic ofera:

- O formulare eficace
- Dezinfectia eficienta a instrumentarului



Sekusept™ Pulver CLASSIC

Detergent si dezinfectant pentru reprocessarea manuala a instrumentarului medical

COMPATIBILITATE CU MATERIALELE

Sekusept Pulver Classic este ideal pentru curatarea si dezinfectia unei game largi de instrumente medicale din metal si elastomeri, precum si policarbonat, plexiglas (PMMA) si polisulfona.

PERFORMANTA DE CURATARE

Datorita ingredientelor sale active, Sekusept Pulver Classic are o putere mare de curatare cu timpi redusti de contact si concentratii scazute ale solutiei de lucru.

PERFORMANTE DE DEZINFECTIE

Sekusept Pulver Classic a trecut printr-o serie vasta de testari si evaluari microbiologice, virusologice, toxicologice si ecologice. Are o eficacitate demonstrata asupra unei game largi de bacterii si virusi, asa cum se poate vedea in tabelul de mai jos.

TABEL DOZARE

LITRI SOLUTIE	CONCENTRATIE SOLUTIE DE LUCRU							
	1%		1.5%		2%		4%	
	gr	ml	gr	ml	gr	ml	gr	ml
1 litru	10	12.5	15	18.75	20	25	40	50
2 litri	20	25	30	37.5	40	50	80	100
4 litri	40	50	60	75	80	100	160	200
8 litri	80	100	120	150	160	200	320	400
10 litri	100	125	150	187.5	200	250	400	500
20 litri	200	250	300	375	400	500	800	1000
30 litri	300	375	450	562.5	600	750	1200	1500

1ml = 0.8 grame 1 masura de dozare = 20g pulbere = 25ml 1 cana de dozare = 160g pulbere = 200ml

PROPRIETATI MICROBIOLOGICE

EFICACITATE/CONDITII	CONCENTRATIE %	TIMP DE CONTACT MIN
Dezinfectia instrumentarului		
In conformitate cu VAH (bactericid si levuricid) Conditii de curatenie & murdarie	4,0% 2,0%	15 min 60 min
Bactericid		
In conformitate cu EN 13727 si EN 14561, conditii de murdarie	4,0% 2,0%	15 min 60 min
Levuricid		
In conformitate cu EN 13624 si EN 14562, conditii de murdarie	4,0% 2,0%	15 min 60 min
Eficient impotriva virusurilor anvelopate		
In conformitate cu DVV2008/EN 17111	0,5%	15 min
Virucid in conformitate cu DVV2008/EN 17111	2%	120 min
Adenovirus. DVV2008 si EN 17111	2%	15 min
Rotavirus. In conformitate cu recomandarile RKI 01/2004*	1%	60 min
SV40. In conformitate cu recomandarile RKI 01/2004*	2%	5 min

*DVV 2008

INFORMATII COMANDA

PRODUS	AMBALARE	COD COMANDA
Sekusept Pulver Classic galetusa cu masura de dozare	4 x 2 kg	3049480
Sekusept Pulver Classic galetusa cu masura de dozare	10 kg	XXXXXX

DOMENIU DE UTILIZARE

Special conceput pentru curatarea si dezinfectia manuala a anumitor tipuri de instrumentar medical. Nu este recomandat pentru endoscoapele flexibile, instrumentarul din aluminiu sau cel cu suprafete nichelate sau cromate.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pentru prepararea solutiei de lucru utilizati cupa/cana de dozare inclusa. Adaugati in apa cantitatea de pulbere recomandata amestecand continuu si repetati de cateva ori in primele 15 minute.

Imersati instrumentele asigurandu-va ca toate suprafetele sunt complet umectate. Curatati reperele in conformitate cu instructiunile producatorului de instrumentar, inclusiv prin actiune mecanica (periere, stergere, etc) pana cand acestea sunt vizibil curate.

Scoateti instrumentele dupa timpul de contact recomandat si clatiti-le cu apa de cel putin calitatea celei potabile. Ulterior uscati suprafetele externe si canalele interne (a endoscoapelor rigide).

Pentru dezinfectia terminala reprocessati conform procedurii. Preparati o solutie de lucru proaspata pentru fiecare zi lucratoare. In cazul unei contaminari vizibile preparati imediat o noua solutie de lucru.

INGREDIENTE

Percarbonat de sodiu, fosfati, tenside neionice. Ingredientul activ, acidul peracetic, se formeaza in solutia de lucru.

DEPOZITARE

Periculos - respectati precautiunile de utilizare (in conformitate cu regulile Europene in vigoare cu privire la clasificarea si etichetarea produselor). Depozitare: intre +5°C si +25°C.

CERTIFICATE SI DOCUMENTATIE

Dispozitiv medical. Eficacitatea completa a Sekusept Pulver Classic este inclusa in dosarul stiintific ce este pus la dispozitie la cerere.

DISPOZITIV MEDICAL - UTILIZATI IN SIGURANTA

Cititi cu atentie informatiile de pe eticheta si Fisa Tehnica a produsului



DOAR PENTRU UTILIZATORII PROFESIONALI.

SC ECOLAB SRL

Centrul de afaceri IDEO
Sos Pacurari, nr 138,
Iasi, 700545
Romania



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



www.ecolab.ro