

În acest moment înălțătorul este fixat corect de vasul WC-ului și poate fi utilizat în deplină siguranță.

Dacă în aceeași incintă sunt mai mulți utilizatori, înălțătorul poate fi extras de pe vasul WC-ului prin simplă ridicare. Cramele de prindere vor rămâne fixate pe înălțător astfel ca ulterior înălțătorul se rereșează pe vasul WC-ului fără alte operații suplimentare. În acest mod înălțătorul se poate lua, spala, dezinfecta, etc și apoi poate fi așezat pe vasul WC-ului.



Dacă dorim să demontăm cramele de fixare în vederea ambalării, transportului, trebuie să apăsăm pe clapeta de deblocare mișcarea (a) din imaginea de mai jos pentru fiecare crama de fixare și apoi să tragem crama către exterior, mișcarea (b) din imaginea de mai jos, până se detașază de corpul înălțătorului.



Specificații tehnice

CMI-7060D-F4:

Lățimea înălțătorului : 35 cm

Adâncimea înălțătorului: 40 cm

Masa produsului: 1.5 Kg

Greutatea maximă admisă: 130 Kg

Înălțimea înălțătorului: 10 cm

CMI-7060D-F6:

Lățimea înălțătorului : 35 cm

Adâncimea înălțătorului: 40 cm

Masa produsului: 2 Kg

Greutatea maximă admisă: 130 Kg

Înălțimea înălțătorului: 15 cm

Produs în PRC pentru: Medico Farmaceutic Denyro S.R.L
Str. Istriei nr.32, bl. 10B, sector 3, București
Tel: 031.409.53.58
Email: office@denyro.ro

CERTIFICAT DE GARANȚIE

TERMEN DE GARANȚIE : 12 luni

PRODUS: SERIE/LOT:

FACTURA/BON: DIN DATA:

CUMPĂRĂTOR:

ADRESA:.....

Prezentul certificat de garanție a fost întocmit în baza legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Garanția produselor este de 12 luni de la data cumpărării, perioadă în care consumatorul beneficiază de repararea sau înlocuirea gratuită a produsului, în cazul în care se constată un defect de fabricație. În cazul eventualelor reclamații, produsele vor fi prezentate la magazinul (farmacia) de unde s-a cumparat. Termenul de soluționare a reclamațiilor este de 15 de zile. În cazul defectării produsului, cumpărătorul îl va duce la magazinul de unde l-a cumpărat, solicitând repararea sau înlocuirea acestuia.

Garanția este valabilă numai dacă aparatul este însoțit de certificatul de garanție și bonul fiscal sau factura de achiziție, completate corespunzător, lizibile, fără modificări, semnate și/sau stampilate. Nu se acorda garanție amortizoarelor de cauciuc (consumabile).

Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a reclamat defectarea produsului și până la repunerea acestuia în funcțiune.

Cumpărătorul își pierde dreptul la garanție dacă: produsul a fost transportat, depozitat manipulat sau utilizat necorespunzător, dacă produsul a fost modificat, a suferit intervenții neautorizate sau a fost utilizat fără respectarea instrucțiunilor.

Prezentul certificat de garanție este valabil doar însoțit de bonul fiscal sau factura de achiziție.

Durata medie de utilizare a produsului este de 3 ani.

Unitate service:

Medico Farmaceutic Denyro SRL

Str. Oxigenului nr. 1F, sat Caldararu, com. Cernica, jud. Ilfov.

Tel: 031.409.53.58, 0751.179.179, 0726.179.179

Semnătura și
stampila importatorului

.....

Semnătura și
stampila vânzătorului

.....

Semnătura
cumpărătorului

.....

ÎNĂLȚĂTOR WC

Cod produs: CMI-7060D-F4, CMI-7060DF-6



Înălțătorul wc este fabricat din plastic rezistent la dezinfectante. Ergonomic, adaptabil la vasele de toaleta standard este prevăzut cu capac pentru prevenirea răspândirii mirosurilor neplăcute în încăpere.

Acesta este folosit pentru a face mai ușor pentru persoana cu dizabilități să se ridice și să se așeze pe vasul de toaletă. Este recomandat pentru persoanele care au avut afectată capacitatea de a sta în picioare sau de a sta jos în condiții de siguranță.

Montaj și utilizare

Poziționați înălțătorul pe o suprafață plană, de exemplu pe masă, cu partea care va sta pe vasul WC în sus, conform imaginii de mai jos:

Introduceți cele patru cleme de fixare în locașurile destinate, astfel încât să fie fixate. **Nu le împingeți până la refuz**, acest lucru îl vom face ulterior.

Luați înălțătorul și poziționați-l deasupra vasului WC cu clemele de prindere către vas.

Așezați înălțătorul pe vasul WC, începeți să împingeți încet, prin rotație clemele de prindere până când acestea vor atinge suprafața vasului WC.

