

RAMPE PORTABILE PENTRU SCAUN CU ROTILE – ALUMINIU ANODIZAT




Δ Vă rugăm să inspectați cu atenție toate piesele pentru fisuri sau rupturi înainte de utilizare.

- Construcție din aluminiu
- Suprafață antiderapantă

Instrucțiuni de montaj

Aceste rampe sunt formate din trei secțiuni care sunt pliate una în alta.

Pentru a le extinde complet, trageți secțiunile 1 și 2 până când butoanele de blocare ies complet în găuri.

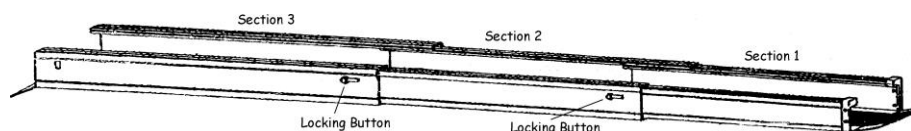

Asigurați-vă că butoanele de blocare sunt complet fixate. În caz contrar, rampa poate deveni instabilă și poate provoca rănirea utilizatorului.



Persoanele cu dizabilități severe sau persoanele care nu pot merge fără ajutor nu trebuie să utilizeze acest produs fără asistență.

Instrucțiuni de utilizare

Pentru a determina lungimea rampei necesare, trebuie mai întâi să determinați înălțimea de urcare.

Aceasta reprezintă distanța verticală dintre sol și locul unde va fi poziționată partea superioară a rampei.

O pantă de 2:12 (9,5°) este considerată acceptabilă pentru rampele portabile utilizate cu scaune rulante sau scutere electrice, atunci când există un asistent calificat.

Pentru a obține o pantă de 2:12, luați valoarea totală a înălțimii și împărțiți-o la 2. De exemplu, dacă înălțimea este de 12 inch, împărțiți la 2 și rezultatul reprezintă lungimea rampei necesare în picioare.

Astfel, ar fi necesară o rampă de 6 picioare.

NOTĂ: Trebuie luat în considerare dacă solul este nivelat sau dacă există o înclinare în direcția opusă punctului unde va fi amplasată rampa.



Greutate maximă suportată: 300 kg

