

ROLATOR DIN ALUMINIU, ROȘU



NOTĂ IMPORTANTĂ DE SIGURANȚĂ: Nu lăsa pe nimeni să te împingă în timp ce ești așezat pe rolator. Acesta este exclusiv un dispozitiv de asistență la mers și nu trebuie folosit ca mijloc de transport.

Asamblare

Mai întâi, scoate toate componentele din cutie.

Deschide cadrul și glisează spătarul căptușit în suporturile cadrului, asigurându-te că butoanele de fixare din partea de jos ies prin orificii.

Scoate roțița de strângere din ambalaj și introdu tubul mânerului în cadru la înălțimea dorită, aliniind găurile corespunzător.

Glisează șuruburile prin găuri dinspre interior și înșurubează roțița de strângere până când totul este fixat sigur.

Operarea frânelor (Sistemul Loop Lock)

Acționează și eliberează întotdeauna frânele roților de pe ambele părți simultan.

1. **Pentru a încetini sau a face o oprire temporară:** Trage ușor în sus de manetele de frână cu patru degete până când rolatorul încetinește sau ajunge la o oprire temporară.

2. **Pentru a bloca temporar roțile pe poziție:** Apasă în jos pe ambele manete de frână cu palmele până când auzi un „clic”, ceea ce îți va indica faptul că roțile sunt blocate.
3. **Pentru a debloca roțile:** Trage în sus de ambele manete de frână cu palmele pentru a le readuce în poziția inițială.



Specificații

- Material principal: AluminIU
- Lățime: 622 ± 13 mm
- Adâncime: 641 ± 13 mm
- Înălțime: 803 - 913 ± 13 mm
- Capacitate greutate: 136 kg
- Dimensiune roți: 150 ± 5 mm
- Depozitare, Curățare și Întreținere

Depozitare și durată de viață: Păstrează produsul într-un loc răcoros, uscat, la temperatura camerei și ferit de surse de căldură. Nu îl depozita la temperaturi extreme (sub 0°C sau peste 40°C) sau afară. Durata de funcționare a produsului depinde de modul de utilizare, întreținere, depozitare și curățare.

Curățare și întreținere: Curăță regulat cu apă caldă și un detergent neutru. Usucă folosind o cârpă curată. Roțile trebuie lubrificate periodic.

Substanțe interzise: Nu folosi alcool, detergenți pe bază de clor, substanțe abrazive, acizi, dezinfectanți sau acetonă, deoarece pot provoca ruginirea suprafețelor metalice și abraziunea părților din plastic. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de substanțe chimice sau corozive folosite la curățare.

Avertisment: Dispozitivul nu trebuie folosit în contact cu uleiuri grele, flăcări deschise sau în medii cu căldură excesivă. A se utiliza la recomandarea unui medic specialist.

Atenție: Nu utiliza rolatorul pe teren accidentat (stâncos) sau pe suprafețe înclinate, deoarece poate deveni instabil. Se recomandă utilizarea doar pe suprafețe unde toate roțile ating pământul.

Utilizare corectă: Este interzisă folosirea produsului în alte scopuri decât cele prevăzute. Utilizarea incorectă anulează răspunderea producătorului pentru daune materiale sau vătămări corporale.

Verificări de siguranță: Asigură-te că toate piesele sunt fixate bine folosind piulițele de blocare furnizate și că părțile care se interconectează sunt blocate în locașurile lor. Nu depăși capacitatea maximă de greutate.