


Instrucțiuni de utilizare

1. Montarea cadrului principal

1.1 Aliniați cadrele principale stânga și dreapta cu suportul scaunului, conform diagramei de mai jos. Introduceți șuruburile și șaibele, apoi strângeți piulițele.


1.2 La montarea suportului pentru găleată, acordați atenție orientării acestuia. Capătul suportului pentru găleată prevăzut cu bară transversală trebuie să fie orientat spre partea din față a scaunului comodă.

1.3 Șuruburile au lungimea de 58 mm, în total 12 bucăți (6 pe fiecare parte). După strângerea piulițelor, utilizați o șurubelniță tip Phillips și o cheie de 10 mm pentru a fixa ferm șuruburile.

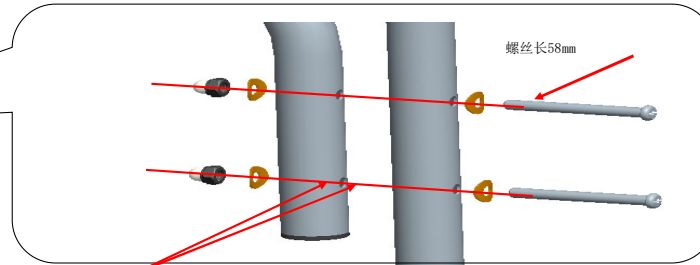


Suprafața concavă a suportului scaunului trebuie să fie aliniată perfect cu suprafața concavă a cadrului principal.

2. Montarea pedalei pentru picioare

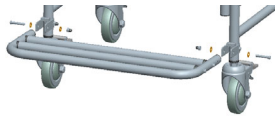


2.1 Montați pedala pentru picioare pe cadrul principal conform diagramei. Aliniați orificiile, introduceți șuruburile și șaibele plate, apoi strângeți piulițele. Folosiți o șurubelniță Phillips și o cheie de 10 mm pentru a le fixa.

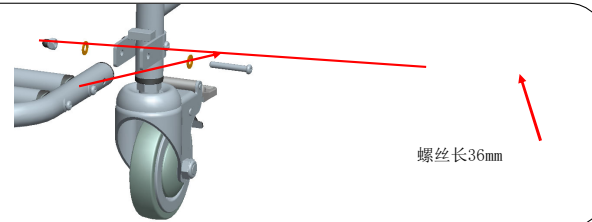


3. Montarea pernei scaunului, a recipientului și a mânerelor

3.1 Montați perna scaunului conform diagramei de instalare.

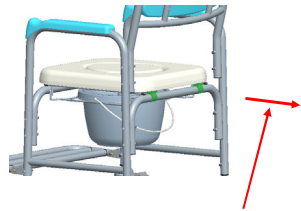

Recipientul (găleata) poate fi scos din partea din spate.

3.2 Montați mânerele pe spătar.

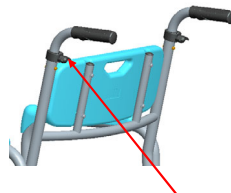

Mai întâi, slăbiți butonul de fixare, introduceți mânerul până când butonul de blocare iese complet, apoi strângeți din nou butonul.

3.3 Diagramă produs final.

