

MOPEDIA®

SCAUNE MULTIFUNCȚIONALE PENTRU BAIE

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

CUPRINS

1. CODURI	PAG.3
2. INTRODUCERE	PAG.3
3. DESTINAȚIA UTILIZĂRII.....	PAG.3
4. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE.....	PAG.3
5. AVERTISMENTE GENERALE	PAG.4
6. SIMBOLURI UTILIZATE	PAG.4
7. DESCRIERE GENERALĂ	PAG.4
7.1 Scaune de baie multifuncționale.....	pag. 4
8. ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE	PAG.4
9. ÎNAINTE DE MONTARE.....	PAG.4
10. ASAMBLARE.....	PAG.5
11. ȘEZUT	PAG.5
11.1 Ridicați cotierele (numai RP783)	pag. 5
11.2 Coborâți cotierele (numai RP783)	pag. 5
12. AVERTISMENTE LA UTILIZARE	PAG.5
13. MOD DE UTILIZARE.....	PAG.6
14. ÎNTREȚINERE.....	PAG.6
15. CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE	PAG.6
15.1 Curățare.....	pag. 6
15.2 Dezinfectare.....	pag. 6
16. CONDIȚII DE ELIMINARE A DEȘEURILOR.....	PAG.6
17. CARACTERISTICI TEHNICE.....	PAG.7
18. PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII	PAG.7
19. GARANȚIE	PAG.8
20. REPARAȚII.....	PAG.8
20.1 Reparații în garanție	pag. 8
20.2 Repararea unui produs care nu este acoperit de garanție	pag. 8
20.3 Produse nedefecte.....	pag. 8
21. PIESE DE SCHIMB.....	PAG.8
22. CLAUZE DE EXCEPTARE.....	PAG.8

Dispozitiv medical de clasa II

REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale

1. CODURI

- RP780:** scaun confortabil 4 funcții în 1
RP781: scaun confortabil 4 funcții în 1 pliant
RP782: scaun confortabil 4 funcții în 1 pe roți
RP783: scaun confortabil 4 funcții în 1 cu cotiere rabatabile

2. INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales un dispozitiv ajutător din gama **MOPEDIA** de la Moretti. Scaunele de baie multifuncționale Moretti au fost proiectate și fabricate pentru a satisface toate nevoile de utilizare practică, corectă și sigură. Manualul de față conține mici sugestii pentru utilizarea corectă a dispozitivului pe care l-ați ales și sfaturi valoroase pentru siguranța dvs. Vă recomandăm să citiți cu atenție întregul manual înainte de a utiliza dispozitivul. În caz de dubii, contactați distribuitorul local, care vă va putea ajuta și sfătui corect.

3. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Scaunele de baie multifuncționale **MOPEDIA** de la Moretti acționează ca un dispozitiv ajutător pentru duș și cadă și sunt potrivite pentru persoanele cu dificultăți de mers. Au patru funcții într-una: scaun de toaletă stabilizator, scaun de toaletă, comodă și scaun de duș.

ATENȚIE!



- Este interzisă utilizarea următorului dispozitiv în alte scopuri decât cele definite în acest manual.
- Moretti S.p.A. își declină orice responsabilitate pentru daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului sau prin altă utilizare decât cea indicată în acest manual
- Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări dispozitivului și următorului manual fără preaviz pentru a-i îmbunătăți caracteristicile

4. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

MORETTI SpA declară sub responsabilitatea sa exclusivă că produsele fabricate și introduse pe piață de către MORETTI SpA și care fac parte din familia SCAUNE ȘI SUPTURI pentru WC sunt conforme cu prevederile aplicabile ale regulamentului 2017/745 privind DISPOZITIVELE MEDICALE din 5 aprilie 2017.

În acest scop, MORETTI SpA garantează și declară pe propria sa răspundere următoarele:

1. Dispozitivele în cauză îndeplinesc cerințele generale de siguranță și performanță, după cum este necesar din Anexa I a Regulamentului 2017/745 conform cerințelor Anexei IV a Regulamentului menționat anterior.
2. Dispozitivele în cauză NU SUNT INSTRUMENTE DE MĂSURĂ.
3. Dispozitivele în cauză NU SUNT DESTINATE INVESTIGAȚIILOR CLINICE.
4. Dispozitivele în cauză sunt comercializate în ambalaje NESTERILE.
5. Dispozitivele în cauză sunt considerate ca aparținând clasei I în conformitate cu cele stabilite prin Anexa VIII a Regulamentului mai sus menționat.
6. MORETTI SpA o menține și pune la dispoziție Autorităților Competente timp de cel puțin 10 ani de la data fabricației ultimului lot, documentația tehnică care dovedește conformitatea la regulamentul 2017-745

Notă: Codurile complete de produs, codul de înregistrare al producătorului (SRN), codul de bază UDI-DI și orice referințe la standardele utilizate sunt raportate în Declarația de conformitate UE pe

care MORETTI SPA o emite și o pune la dispoziție prin canalele sale.

5. AVERTISMENTE GENERALE

- Pentru utilizarea corectă a dispozitivului, consultați acest manual.
- Pentru utilizarea corectă a dispozitivului, consultați întotdeauna medicul sau terapeutul.
- Verificați dacă produsul este livrat intact și păstrați-l ambalat departe de surse de căldură
- Durata de viață utilă a dispozitivului este determinată de uzura pieselor nereparabile și/sau înlocuibile
- Acordați întotdeauna atenție prezenței copiilor.
- Utilizatorul și/sau pacientul trebuie să raporteze producătorului sau autorității competente a statului membru în care se află utilizatorul și/sau pacientul orice incident grav care are loc în legătură cu dispozitivul.

6. SIMBOLURI UTILIZATE

	Cod produs
	Identificatorul unic al dispozitivului
	Marcaj CE
	Producător
	Lot de producție
	Citiți manualul pentru instrucțiuni
	Dispozitiv medical
	Condiții de eliminare a deșeurilor

7. DESCRIERE GENERALĂ

7.1 Scaune de baie multifuncționale

RP780	Model fix
RP781	Model pliant
RP782	Model demontabil, pe roți
RP783	Model cu cotiere rabatabile

Scaunele de baie multifuncționale **MOPEDIA** sunt realizate din aluminiu anodizat (RP783 este din oțel), cu șezut confortabil din PVC și protecții antiderapante din cauciuc (cu excepția modelului RP782 - dotat cu roți pivotante). Posibilitate de reglare pe înălțime în trepte de 2,5 cm. Au patru funcții într-una: scaun de toaletă stabilizator, scaun de toaletă, comodă și scaun de duș. Disponibil în versiuni fixă, pliabilă și detașabil pe roți.

8. ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE

- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor pentru a garanta utilizarea dispozitivului în siguranță totală pentru oameni și lucruri
- Verificați introducerea corectă a butonului în orificiu, precum și asamblarea dispozitivului

9. ÎNAINTE DE MONTARE

Despachetați produsul și verificați dacă nu a suferit deteriorări la transport. Dacă produsul este deteriorat, contactați cel mai apropiat distribuitor.

10. ASAMBLARE

- RP780** Introduceți suportul de toaletă al produsului, care este livrat deja asamblat. Aveți grijă să încastrați corect suportul cu bara orizontală din spate.
- RP781** Trageți părțile laterale ale structurii, ridicați partea cu suportul de toaletă deja asamblat și fixați cele două capete de părțile laterale.
- RP782** Trageți părțile laterale ale structurii, ridicați partea cu suportul de toaletă deja asamblat și fixați cele două capete de părțile laterale. Introduceți suportul de toaletă asigurându-vă că încastrați corect suportul cu bara orizontală din spate.



- RP783** Introduceți suportul de toaletă având grijă să încastrați corect suportul cu bara orizontală din spate. Introduceți bara de spătar îndreptată în sus în orificiile corespunzătoare din ghidajele din spate. Blocați-l cu clemele de siguranță.

11. ȘEZUT



(fig.1)



(fig.2)

Apăsați clema de siguranță ca să reglați înălțimea scaunelor prin deșurubarea părții interioare a piciorului și aducând-o în găuri în funcție de înălțimea dorită. Verificați dacă toate cele patru picioare sunt reglate la aceeași înălțime.

11.1 Ridicați cotierele (numai RP783)

Rotiți cotierele în sus până la poziția de blocare de siguranță a clemelor corespunzătoare. (fig.1)

11.2 Coborâți cotierele (numai RP783)

Apăsați clemele de siguranță spre interior și apoi rotiți cotierele în jos. (fig.2)

NOTĂ Înainte de a vă așeza:

- Așezați produsul pe o suprafață plană și solidă și, dacă este cazul, blocați frânele roților
- Asigurați-vă că opritorul de blocare este bine fixat și că produsul este într-o poziție stabilă

12. AVERTISMENTE LA UTILIZARE

- Utilizați cu precauție pe suprafețe umede și alunecoase
- Nu depășiți greutatea maximă a pacientului indicată pe eticheta produsului și în capitolul cu caracteristicile tehnice din manualul de față

(fotografie cu scop ilustrativ)

- Scaunul poate fi folosit numai pe o suprafață solidă, plană. Nu folosiți scaunul pe scări, pante sau rampe
- Nu utilizați scaunul în alt mod decât cel indicat în manualul de față. Se declină orice răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare a scaunului
- Evitați să lăsați dispozitivul în aer liber și în contact cu apa pentru o perioadă îndelungată
- Verificați periodic stabilitatea și robustețea produsului, precum și starea protecțiilor antiderapante de sprijin și a roților. Înlocuiți-le dacă sunt uzate
- În caz de dubii cu privire la utilizarea, reglarea sau întreținerea produsului, contactați distribuitorul
- Pentru a evita orice risc, nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.

13. MOD DE UTILIZARE

- Așezați-vă pe scaun, distribuindu-vă greutatea pe tot șezutul. Nu stați împingând doar într-o parte
- Rezemați-vă întotdeauna pe ambele cotiere pentru ridicare și menținerea echilibrului;
- Dacă scaunul este folosit de persoane cu dificultăți motorii speciale, ajutați-i întotdeauna să se așeze și să se ridice de pe scaun



ATENȚIE!

Nu mutați dispozitivul cu pacientul așezat

14. ÎNTREȚINERE

La introducerea pe piață, dispozitivele din gama **MOPEDIA** de la Moretti sunt atent verificate și poartă marcajul CE. Pentru siguranța pacientului și a medicului, se recomandă ca produsul să fie verificat de către producător sau de un laborator autorizat, cel puțin o dată la 2 ani.

Inspekția periodică înseamnă o examinare a următoarelor părți:

- Structura de susținere a scaunului și piesele de legătură
- Verificarea montării și a funcționării roților cu frâna respectivă
- Verificarea tuturor punctelor de sudură
- Verificarea uzurii protecțiilor antiderapante (acolo unde sunt prezente)

În cazul reparațiilor, trebuie folosite doar piese de schimb și accesorii originale.

15. CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE

15.1 Curățare

Pentru curățarea produsului, utilizați doar o cârpă înmuiată în apă și uscați cu o cârpă curată și uscată sau cu apă caldă și săpun neutru.



ATENȚIE!

Nu folosiți substanțe abrazive, acizi, alcoolii, detergenți pe bază de clor, dezinfectanți și acetona, deoarece aceste substanțe provoacă abraziunea pieselor din plastic și ruginirea suprafețelor metalice.

Producătorul nu va fi responsabil pentru daunele cauzate prin utilizarea de materiale care pot deteriora suprafața produsului sau utilizarea de substanțe chimice corozive la curățare.

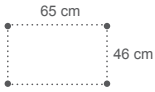
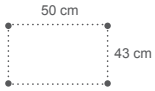
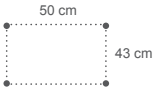
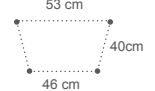
15.2 Dezinfectare

Dacă este necesar, dezinfectați produsul folosind un dezinfectant delicat.

16. CONDIȚII DE ELIMINARE A DEȘEURILOR

Dacă aruncați dispozitivul, nu utilizați niciodată sisteme normale de eliminare a deșeurilor municipale solide. În schimb, se recomandă eliminarea dispozitivului prin centrele ecologice municipale pentru operațiunile planificate de reciclare a materialelor utilizate.

17. CARACTERISTICI TEHNICE

Coduri	Capacitate max	Înălțime cotiere	Înălțime șezut	Bază	Materiale utilizate
RP780	130 kg	De la 66 la 76 cm	De la 45 la 55 cm		Structură tubulară din aluminiu
RP781		De la 64 la 74 cm	De la 46 la 56 cm		Structură tubulară din aluminiu
RP782		De la 64 la 74 cm	De la 47 la 57 cm		Structură tubulară din aluminiu
RP783		De la 60 la 78 cm	De la 40 la 58 cm		Structură tubulară din oțel

Dimensiunile au o toleranță de ± 1 cm

18. PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII



RV7058-4

Șezut și capac pentru scaun confortabil
RP780 - RP781
RP782
Dimensiuni orificii:
20,5 x 24 cm



RV7058-5

Scaun și capac pentru scaun confortabil
RP783



RV7069-1

Găleată, mâner și capac pentru scaun confortabil
RP78x



RV7024

Ø 29mm
Tălpi pentru
RP78x
4 buc.



RV7051

Roți pivotante pentru perechea **RP782**

(fotografie cu scop ilustrativ)

19. GARANȚIE

Toate produsele Moretti sunt garantate împotriva defectelor de material sau de manoperă pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data vânzării produsului, sub rezerva oricăror excluderi și limitări specificate mai jos. Această garanție nu este valabilă în caz de utilizare greșită, abuz sau modificare a produsului și nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. Destinația corectă de utilizare a produsului este indicată în manualul de utilizare.

Moretti nu este responsabilă pentru eventuale daune rezultate, vătămări corporale sau orice altceva cauzate de sau legate de instalarea și/sau utilizarea echipamentului care nu respectă în mod scrupulos instrucțiunile date în manualele de instalare, asamblare și utilizare.

Moretti nu garantează produsele Moretti împotriva daunelor sau defectelor în următoarele condiții: dezastră naturale, operații de întreținere sau reparații neautorizate, daune rezultate din probleme de alimentare electrică (unde este cazul), utilizarea de piese sau componente nefurnizate de Moretti, nerespectarea prevederilor din ghiduri și instrucțiuni de utilizare, modificări neautorizate, daune la transport (alte decât expedierea inițială de la Moretti) sau neefectuarea întreținerii conform indicațiilor din manual. Componentele supuse uzurii nu sunt acoperite de această garanție dacă daunele sunt cauzate de utilizarea normală a produsului.

20. REPARAȚII

20.1 Reparații în garanție

Dacă un produs Moretti prezintă defecte de material sau de fabricație în perioada de garanție, Moretti va evalua împreună cu clientul dacă defectul produsului este acoperit de garanție. Moretti, la discreția sa, poate înlocui sau repara articolul aflat în garanție, la un distribuitor Moretti specificat sau la sediul său. Costurile cu manopera legate de repararea produsului pot fi plătite de Moretti dacă se stabilește că reparația se încadrează în domeniul de aplicare al garanției. O reparație sau o înlocuire nu reînnoiește sau nu extinde garanția.

20.2 Repararea unui produs care nu este acoperit de garanție

Un produs care nu este acoperit de garanție poate fi returnat pentru reparații numai după primirea autorizației prealabile din partea serviciului pentru clienți Moretti. Costurile cu manopera și de transport legate de o reparație neacoperită de garanție vor fi suportate integral de client sau revânzător. Reparațiile la produsele neacoperite de garanție sunt garantate timp de 6 (șase) luni, începând din ziua primirii produsului reparat.

20.3 Produse nedefecte

Clientul va fi anunțat dacă, după examinarea și testarea unui produs returnat, Moretti ajunge la concluzia că produsul nu este defect. Produsul va fi returnat clientului, iar acesta va fi responsabil pentru costurile de transport cu returul.

21. PIESE DE SCHIMB

Piesele de schimb originale Moretti sunt garantate timp de 6 (șase) luni începând din ziua primirii piesei de schimb.

22. CLAUZE DE EXCEPTARE

Cu excepția cazurilor specificate în mod expres în această garanție și în limitele legii, Moretti nu dă alte declarații, garanții sau condiții, exprese sau implicite, inclusiv orice declarații, garanții sau condiții de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, neîncălcare și neinterferență. Moretti nu garantează că utilizarea produsului Moretti va fi neîntreruptă sau fără erori. Durata oricăror garanții implicite care pot fi impuse prin lege este limitată la perioada de garanție, în limitele legii. Unele state sau țări nu permit limitări cu privire la durata unei garanții implicite sau excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau de consecință cu privire la produsele de consum. În astfel de state sau țări, este posibil ca unele excluderi sau limitări ale acestei garanții să nu se aplice. Această garanție poate fi schimbată fără notificare.



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Produs _____

Achiziționat la data de _____

Distribuitor _____

Strada _____ Localitatea _____

Vândut către _____

Strada _____ Localitatea _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

FABRICAT ÎN Rep. Pop. Chineză

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notă

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com