



Manual de utilizare
Saltea pneumatică anti-decubit
cu pompă „MINOA”



0806270 (0806271 și 0806272)

DESCRIERE PRODUS

Saltelele anti-escare sunt special concepute pentru a trata și a ajuta escarele la pacienții imobilizați la pat. Pot fi utilizate în spital sau acasă. Distribuți uniform presiunea pe corp pentru a preveni edemul.

Pompa schimbă presiunea aerului din saltea, creând o senzație de masaj ușor și activând celulele imobilizate datorită întinderii.

Acest produs este indicat și recomandat pacienților care sunt predispuși să petreacă mai mult de 15 ore pe zi în pat și pacienților cu risc scăzut până la mediu de a dezvolta ulcere și escare.

FUNCȚIONARE UTILIZARE

Pentru saltea cu bule (0806271)

-Așezați saltea gonflabilă peste saltea patului, întinzând mai întâi cearșaful de jos, asigurându-vă că orificiul de admisie a aerului este în lateralul picioarelor.

-Fixați-l cu curele de fixare sub saltea

-Așezați peste saltea gonflabilă o țesătură subțire și respirabilă, dacă nu este însoțită de propria husă, astfel încât să nu intre în contact direct cu pielea pacientului.

Pentru pompă (0806272)

-Ațașați saltea la pompă folosind furtunurile corespunzătoare din ambalaj.

Conectați pompa la sursa de alimentare, apăsați butonul „ON/OFF” și rotiți butonul la maxim pentru a umfla saltea, ÎNAINTE de a fi utilizată de către pacient.

-Când saltea este complet umflată, puteți ajusta intervalul de presiune, în funcție de cerințele utilizatorului, folosind comutatorul.

SPECIFICAȚII

POMPA	Tensiune (V) - Frecvență (Hz)	CA 220-240V/ 50Hz
	Debit de aer	≥5-6 litri/min
	Interval de presiune	50 mmHg – 110 mmHg
	Timp de ciclu	12 MINUTE
	Consum de energie	≤ 7 W ± 10%
	Zgomot	≤ 30 dB ± 10%
	Dimensiuni (LxIxÎ)	23,5 x 11,7 x 8,1 cm
	Greutatea pompei	1 kg
BULE SALTEA	Sarcină maximă	130 kg
	Material	PVC de calitate medicală
	Grosimea PVC-ului	0,3 mm
	Dimensiuni (LxIxÎ)	200 x 90 x 7,0 cm
	Lungimea furtunului.	120 cm
	Greutate	2 kg

ÎNTREȚINERE

- Pentru curățarea saltelei, folosiți o cârpă moale sau un burete și apă cu săpun delicat. ATENȚIE: Nu utilizați diluții acide și caustice.
- Nu fumați și nu folosiți flacăra în apropierea saltelei.
- Nu puneți salteaua în contact direct cu surse de căldură.
- Dacă trebuie să salvați salteaua, goliți-o de aer, pliați-o
- Păstrați sau depozitați pompa într-un mediu curat, uscat și bine ventilat.
- Înainte de curățarea pompei, deconectați-o de la sursa de alimentare electrică.
- Curățați pompa cu o lavetă uscată. ATENȚIE: Nu aduceți pompa în contact cu lichide.

IMPORTANT (!)

ATENȚII

- Nu deconectați furtunurile în timp ce pompa funcționează.
- Nu folosiți obiecte ascuțite în apropierea saltelei.
- Nu depășiți sarcina maximă (kg) recomandată de producător.
- Protejați produsul cu uleiuri, loțiuni și creme, acoperindu-l cu vată sau un prosop de baie.
- Nu folosiți produse de curățare abrazive pe bază de alcool atunci când salteaua este uscată. Acest lucru ar putea deteriora materialul din care este făcută salteaua.
- Curățați tapițeria după fiecare utilizare zilnică.

Vă recomandăm să curățați tapițeria cu un detergent blând pentru a o proteja de petele de ulei și praf. O practică obișnuită este utilizarea unei sticle cu pulverizator umplute cu un amestec de săpun antibacterian și apă. Pulverizați suprafața și apoi ștergeți-o cu un prosop curat. Cea mai bună soluție este să fie curățată cu apă caldă amestecată cu un săpun blând și apoi uscată complet.
- Protejați stratul de zgârieturi, tăieturi și perforații.
- Nu lăsați produsul să funcționeze dacă nu îl utilizați.

IMPORTANT (!)

În caz de deteriorare sau funcționare defectuoasă a pompei, vă rugăm să contactați distribuitorul autorizat și calificat.

Declarație CE de conformitate

Suntem singurii responsabili pentru declararea faptului că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt din Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, acolo unde este cazul, standardele și legislația la care se face referire.

ATENȚIE! (!)

Nu utilizați produsul în scopuri care nu sunt indicate în acest manual

Numai personalul calificat sau instruit pentru tratarea și prevenirea escarelor poate utiliza dispozitivul.

MOBIAC SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate din utilizarea incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.

MOBIAC SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă.



PROTECȚIA MEDIULUI

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dumneavoastră, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (aceasta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice, care vă vor informa cu privire la centrele de reciclare la care trebuie eliminat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră ajută la protejarea mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.
- 4) Produsele electrice, din cauza materialelor lor de construcție, dacă nu sunt eliminate corect, pot duce la pericole pentru mediu și, în plus, pentru sănătate.

PIESE DE SCHIMB

NUMĂR DE REF.	DESCRIERE
0806271	SALTEA GONFLABILĂ MINOA
0806272	POMPA MINOA

DETALII SCALA NORTON

Scara Norton a fost dezvoltată în anii 1960 și este utilizată pe scară largă pentru a evalua riscul de ulcere de presiune la pacienții adulți.Cele cinci subscale ale scalei Norton sunt adunate pentru un scor total cuprins între 5 și 20.Un scor Norton mai mic indică niveluri mai ridicate de risc pentru dezvoltarea ulcerelor de presiune.

SCOR	RISC PENTRU ULCER DE PRESIUNE DEZVOLTARE
> 18	SCĂZUT
18-14	MEDIU
14-10	RIDICAT
< 10	FOARTE RIDICAT

Vă rugăm să rețineți că Scala Norton este un instrument care trebuie utilizat doar de către profesioniștii din domeniul sănătății instruiți și doar ca supliment la o evaluare amănunțită a stării pacientului.

COD MBK	POTRIVIT PENTRU SCORUL SCALEI NORTON
0806270	19 – Risc scăzut

GARANȚIE

Produsul are garanție de doi (2) ani pentru pompă și șase (6) luni pentru saltea și alte componente nemecanice. Garanția acoperă defectele de fabrică și nu daunele rezultate din utilizarea/întreținerea necorespunzătoare a produsului.

Garanția se aplică defectelor de fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea deficitară, modificarea, abuzul sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

Daunele sau defectele cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (unde este cazul) și companii de transport nu sunt acoperite de garanție.

Formular de garanție

Datele cumpărătorilor

Nume:.....

Data achiziției:.....**S/N:**.....

LOT:.....**Telefon:**

Datele distribuitorilor

Nume:.....

Adresa:.....

Telefon:.....

Ștampilă de revânzător

RAPORTARE INCIDENTE:

Orice incident grav care apare în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

MD

Ιατρική Συσκευή
Medical Device



Σήμα συμμόρφωσης CE
CE Mark



Κατασκευαστής
Manufacturer



Ημερομηνία Παραγωγής
Production Date

REF

Κωδικός Προϊόντος
Product Number



Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης
Read the instruction for use

SN

Σειριακός Αριθμός
Serial Number



Μην χρησιμοποιείται εάν το
κουτί είναι κατεστραμμένο
Do not use if Package is Damage

LOT

Αριθμός Παρτίδας
Batch Number



Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά
Right Way Up

UDI

Μοναδικός αναγνωριστικός
κωδικός προϊόντος
Unique Device Identification



Κρατήστε μακριά από
ηλιοφάνεια
Keep away from sunlight



Διατηρήστε Στεγνό
Keep Dry



Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια
Stacking Height



Χειριστείτε με προσοχή
Handle With Care



Εύθραυστο
Fragile



Χρήση Μόνο για
Εσωτερικό Χώρο In Door
Use Only



Απόρριψη Ηλεκτρικών
Εξαρτημάτων
Waste Electrical and Electronic
Equipment Directive