

CERTIFICAT DE GARANȚIE

TERMEN DE GARANȚIE: 12 luni

PRODUS:

SERIE/LOT:

FACTURA/BON: DIN DATA:

CUMPĂRĂTOR:

ADRESA:

Prezentul certificat de garanție a fost întocmit conform OG 21/1992 si OUG 140/2021 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Garanția produselor este de 12 luni de la data cumpărării, perioadă în care consumatorul beneficiază de repararea sau înlocuirea gratuită a produsului, în cazul în care se constată un defect de fabricație. În cazul eventualelor reclamații, produsele vor fi prezentate la magazinul (farmacia) de unde s-a cumparat. Termenul de soluționare a reclamațiilor este de 15 de zile.

În cazul defectării produsului, cumpărătorul îl va duce la magazinul de unde l-a cumpărat, solicitând repararea sau înlocuirea acestuia.

Garanția este valabilă numai dacă aparatul este însoțit de certificatul de garanție si bonul fiscal sau factura de achiziție, completate corespunzător, lizibile, fără modificări, semnate și/sau ștampilate. Nu se acorda garanție amortizoarelor de cauciuc (consumabile).

Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a reclamat defectarea produsului și, până la repunerea acestuia în funcțiune. Cumpărătorul își pierde dreptul la garanție dacă: produsul a fost transportat, depozitat manipulat sau utilizat necorespunzător, dacă produsul a fost modificat, a suferit intervenții neautorizate sau a fost utilizat fără respectarea instrucțiunilor.

Prezentul certificat de garanție este valabil doar însoțit de bonul fiscal sau factura de achiziție.

Durata medie de utilizare a produsului este de 3 ani.

Unitate service:

Tesa Medical Solutions SRL

Str. Ștefan Greceanu nr. 3, bl. L4 Ploiești

Tel.: 0371 71 80 80

Semnătura și ștampila
vânzătorului

Semnătura cumpărătorului

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

SCAUN CU WC DE CAMERA



Montare, reglaj, intreținere

Comoda wc de cameră are un schelet de oțel, pliabil. In cutia de ambalaj, pentru ca spațiul ocupat sa fie minim, comoda este pliata. După ce se scot din ambalaj toate componentele comodei se procedează astfel:

Aduceți către partea din față lateralele „1” și „2”, montați partea de șezut „4” astfel încât cele două urechi de fixare sa vină peste cele două laterale. Montați capacul comodei WC „5”. Acesta are doua cleme din PVC pentru fixare pe șezut și intra prin presare pe bara din spate a șezutului. Recipientul pentru necesități „7” se introduce între barele de susținere aflate sub colac. Înălțimea comodei poate fi modificată prin intermediul butoanelor de reglaj câte unul pe fiecare picior al acesteia. Se apasă butonul de reglaj „8” și se trage în afara partea de picior cu puferul de cauciuc. Se efectueaza aceeași operație pentru fiecare picior „8” având grija ca lungimea sa fie aceeași, lucru ce se realizează punând același număr de gauri de reglaj pentru fiecare picior.


Comoda se înalță suficient cât sa treacă peste vasul de WC, astfel încât poate avea și rolul de înălțător vas WC, utilă celor care au suferit operații de sold.

Comoda se poate igieniza periodic, se scot: recipientul pentru necesități, colacul și capacul, se pot spala cu un detergent lichid sau soluție de săpun, se clătesc în jet de apa curenta, se șterg și se montează pe scheletul comodei.

In general comoda WC se amplasează în apropierea patului persoanei cu probleme de deplasare pentru a facilita transferul acestuia pe comodă și ulterior înapoi în pat, sau fotoliu.

Utilizarea scaunului cu WC

In recipientul pentru colectarea necesităților puneți înainte de utilizare un sac menajer din pvc, cu marginile răsfrânte peste recipientul de colectare. In interiorul sacului menajer amplasați un strat de hârtie igienica cu rol de absorbant al stropilor de urina. După colectare ridicați și înlocuiți sacul menajer cu unul nou.

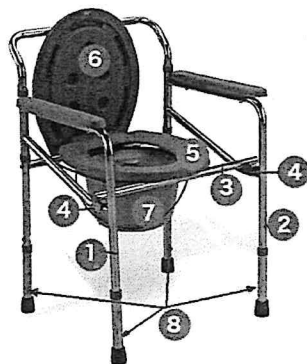

Întreținere

În cazuri avansate de murdărie, ridicați întregul șezut, spălați-l cu un detergent lichid, sau cu soluție de săpun și clătiți-l în jet de apa curentă. Lăsați-l la uscat departe de surse de căldura. Vasul colector poate fi spălat și dezinfectat cu detergent lichid sau soluție de săpun. Clătiți-l energic în jet de apă curentă și lăsați-l la uscat departe de sursele de căldură.

Cadrul metalic al comodei, spătarul, roțile, sprijinul de picioare, în general orice parte componenta se poate șterge cu o cârpa moale, se poate folosi un detergent lichid și apoi se șterge cu o cârpa uscata. Nu folosiți elemente sau substanțe abrazive pentru curățare, diluanți solvenți.

Nu depășiți greutatea maximă a utilizatorului față de cea indicată de producător!

SPECIFICATII TEHNICE

Înălțimea: 65-75 cm

Înălțime șezut: 35-45 cm

Lățimea între manere: 46 cm

Lățimea totala: 54 cm

Adâncimea totală: 50 cm

Greutate: 4,5 Kg

Compozitie/Material: Otel

Greutate maxima utilizator: 100 Kg